










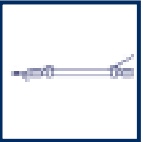
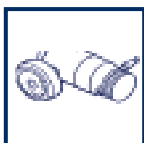








Westfalen Medical BV
 Rigastraat 14
 7418 EW Deventer
 Nederland
 Tel. +31 570 - 858 450
 Fax +31 570 - 858 451
 www.westfalenmedical.nl
 info@westfalenmedical.nl

Instructiekaart Homefill

<p>1. Lees altijd de instructies.</p> 	<p>2. Niet roken. Geen open vuur.</p> 	<p>3. Ventileer de ruimte goed.</p> 
<p>4. Plaats de concentrator niet onder de kapstok of tegen de gordijnen. Dit i.v.m. verzadiging zuurstof.</p> 	<p>5. Plaats de concentrator op een veilige plek zoals aangegeven. Concentrator moet rechtop gebruikt worden.</p> 	<p>6. Geen smeermiddel gebruiken waar vet in zit.</p> 
<p>7. Gebruik geen elektrische apparatuur.</p> 	<p>8. Technisch onderhoud mag alleen worden verricht door onze service-medewerkers. Er mogen geen verlengkabels worden gebruikt.</p> 	<p>9. Wekelijks dient het groffilter schoongemaakt te worden. Deze vindt u aan de zijkant of achterkant van het apparaat. Schoonmaken kan d.m.v. afspolten en afdrogen.</p> 
<p>10. Zet de homefill compressor en de concentrator aan d.m.v. de aan-uit knop.</p> 	<p>11. Stel de flow in op de concentrator, Let op! Tijdens het vullen: <i>Perfect O2</i> Maximaal 3 L/min <i>Platinum S</i> Maximaal 3 L/min <i>Platinum 9</i> Maximaal 7 L/min</p> 	<p>12. Verbind de compressor, met de concentrator d.m.v. de gekrulde zuurstofslang.</p> 
<p>13. LET OP! De cilinder dient leeg te zijn, alvorens deze gevuld wordt. Tijdens het vullen dient de flowmeter op 0 / off te staan, dit is af te lezen in het rode vlak.</p> 	<p>14. Vòòr het aansluiten van de cilinder de huls naar beneden duwen, tot de groene stippen zichtbaar zijn.</p> 	<p>15. Klik de cilinder in de vulconnector, je hoort een duidelijke klik.</p> 
<p>16. Na het aansluiten van de cilinder kun je de voortgang volgen door het aflezen van de LED-indicatoren.</p> <p>LET OP! Het kan een paar minuten duren voordat de compressor begint met vullen.</p>	<p>17. Als de cilinder vol is, kunt u deze afkoppelen door de ring van de vulconnector naar beneden te drukken. Hierna kunt u de compressor uitzetten.</p> 	<p>18. Storingen en/of vragen:</p>  <p>Tel. 0570 - 858 450</p>